


COMMENT AIDER UNE VICTIME D'UN ARRÊT CARDIAQUE SOUDAIN

Un arrêt cardiaque peut arriver n'importe où, à n'importe quel moment. Le cœur cesse de battre inopinément et les meilleures chances de survie de la victime reposent sur la mise en place immédiate d'une RCP (Réanimation Cardio-Pulmonaire) avec un DAE.

Ne paniquez pas. Vous pouvez aider.

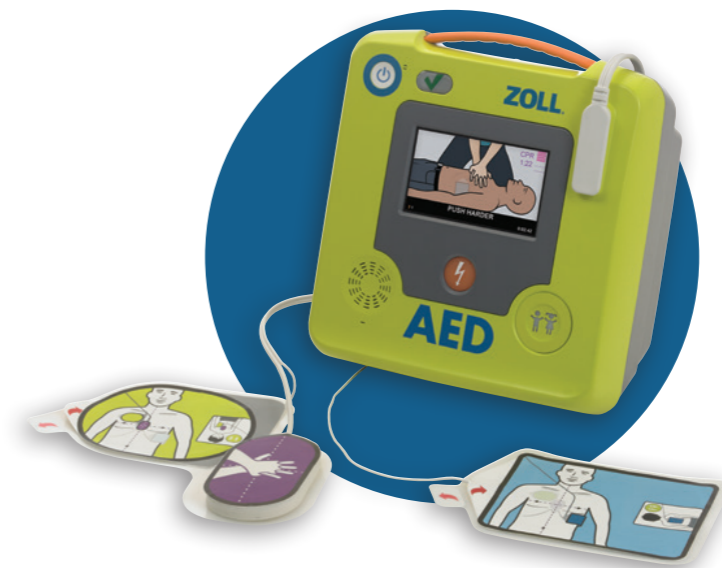

COMMENT AIDER

Heart Saver CPR - 2020 ERC Guidelines

Vérifier le danger

Vérifier l'état de conscience

Appeler de l'aide
Appeler les services d'urgence

Ouvrir les voies respiratoires

Vérifier la respiration

Débuter Réanimation
Cardio-pulmonaire (RCP)

Installer un DAE aussi vite que
possible et suivre les instructions

COMMENT ZOLL PEUT VOUS AIDER


ZOLL AED 3® avec Real CPR Help®




Vérifier l'état de conscience
"Etes vous OK?"




Appeler de l'aide
Appeler les services d'urgence

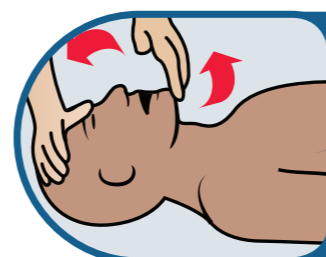

Ouvrir les voies respiratoires
Vérifier la respiration

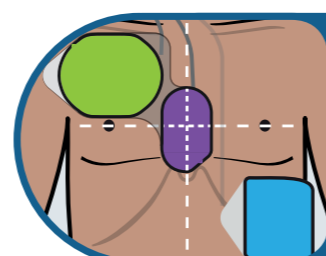

"Coller les électrodes sur
la poitrine du patient"

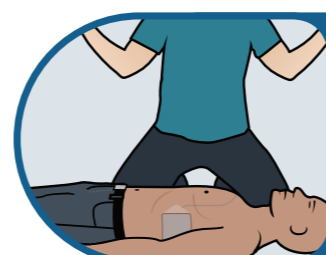


"Ne pas toucher
la victime, analyse"



Si un choc est conseillé, appuyer sur
le bouton de choc clignotant (valable
pour les versions semi-automatique)



Si aucun choc n'est conseillé,
débuter RCP

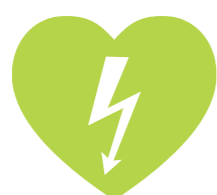

Les DAE de ZOLL offre une assistance tout au long de la RCP avec un retour d'information en temps réel de la qualité de profondeur et de la fréquence des compressions thoraciques. Ceci aide les secouristes à administrer une RCP conforme pour augmenter les chances de survie de la victime.